



## GENETIC COUNSELLING SERVICES

Haarweg 8 7676 PE Westerhaar-Vriezenv wijk ☎ 0031 (0)456 658362 ✉ [info@gencouns.nl](mailto:info@gencouns.nl)

### Instructie bemonstering swabs

U ontvangt per aangevraagd dier een drietal steriel verpakte swabs. Een swab is een staafje met daaraan een borsteltje, waarmee op eenvoudige en pijnloze wijze materiaal aan de binnenkant van de wang kan worden afgenomen.

Instructie:

1. Laat het dier minimaal 1 uur voordat het wangsljm wordt afgenomen niet eten. Wij adviseren vlak voor de afname de bek van het dier te spoelen met (schoon) water
2. Open de steriele swab-verpakking voorzichtig aan de bovenkant, zodat deze later weer hersluitbaar is.
3. Neem de swab uit de verpakking (zonder het borstelgedeelte aan te raken) en schraap hiermee stevig over de binnenkant van de wangen van het dier, 2 keer aan elke kant.
4. Laat de swab enkele uren aan de lucht drogen.
5. Plaats de swab terug in de verpakking en sluit deze met een stukje plakband.
6. Vermeld op de verpakking duidelijk leesbaar de naam van het dier, indien aanwezig het chip- of tatoeagenummer (eventueel barcode gebruiken) en datum van de afname. Stop de verpakking (met swab) in de meegeleverde blanco enveloppe.
7. U herhaalt de handelingen 2 tot en met 6 voor de twee andere swabs, zodat uiteindelijk **drie swabs afkomstig van één dier** in één en dezelfde enveloppe zitten.
8. Doe tenslotte het op dit dier betrekking hebbende meldingsformulier en de kopie van het registratiedocument in dezelfde enveloppe en plak de enveloppe dicht.
9. Voor eventuele meerdere dieren herhaalt u de handelingen 1 t/m 7. Hierdoor ontstaan er meerdere setjes van dichtgeplakte enveloppen waarin drie swabs van hetzelfde dier met bijbehorend formulieren.
10. De setjes verzendt u uiteindelijk in een voldoende gefrankeerde verzamelenvelpe aan:

**Genetic Counselling Services**  
**Haarweg 8**  
**7676 PE Westerhaar-Vriezenv wijk**  
**Nederland.**